

1C50 Taleo

Nouveau
dès juillet 2020

Imperméable



Prêt pour la vie quotidienne

Taleo est conçu pour les utilisateurs actifs qui se déplacent dans une variété d'environnements intérieurs et extérieurs et qui veulent marcher sans effort partout où la vie les mène.

Les avantages en un coup d'oeil

- Des ressorts doubles et un long ressort en carbone permettent un roulement en douceur et un retour d'énergie efficace à différentes vitesses de marche.
- Raccordement flexible unique des ressorts en carbone à l'avant du pied pour une adaptation optimale aux différents terrains.
- Amortissement individuel des chocs grâce à trois différentes options de cales de talon
- Résistant à l'eau douce, au sel et à l'eau chlorée
- Les contours de drainage de l'eau sur l'adaptateur et les ouvertures dans la plante du pied empêchent l'eau de s'accumuler dans la prothèse.
- L'adaptateur de connexion mince convient pour l'approvisionnement cosmétique
- Compatible avec toutes les articulations du genou contrôlées par micro-processeur Ottobock

Caractéristiques techniques

Degré de mobilité	MG 3 -4
Poids corporel max.	150 kg
Tailles	22 - 30 cm
Housse de pied	Forme étroite avec talon de 15 ± 5mm de hauteur (taille 22 - 25 cm) Forme normale avec talon de 10 ± 5mm de hauteur (taille 24 - 30 cm)
Poids sans housse*	450 g
Poids avec housse normal*	690 g
Hauteur de montage	150 mm (avec housse de pied normal*)
* Taille de référence 26 cm	

No. de tarif	Prix (avec housse de pied)
7110.163.050	CHF 3'385.00



Sélection de la rigidité du ressort

en fonction du poids corporel, de l'activité ¹ et de la taille ²

¹ Poids corporel (kg)	Activité normale	Activité élevée
jusqu'à 51	1	2
52 - 58	2	3
59 - 67	3	4
68 - 77	4	5
78 - 88	5	6
89 - 100	6	7
101 - 115	7	8
116 - 130	8	9
131 - 150	9	-

² Taille	et rigidité								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						-	-	-	-
23							-	-	-
24								-	-
25									-
26								**	-
27	-	-						**	**
28	-	-						**	**
29	-	-	-	***	***	***	***	***	***
30	-	-	-	***	***	***	***	***	***

** Ne combinez pas le produit avec un C-Leg 3C88-3 ou C-Leg 3C98-3.

*** Avant de procéder à une combinaison avec une prothèse mécanique du genou, contactez le service client Ottobock.

■ Housse de pied étroite disponible (hauteur du talon 15 ± 5mm)

■ Les deux housses de pied sont disponibles

■ Housse de pied normal disponible (hauteur du talon 10 ± 5 mm)